

펄스옥시미터의 교체대상 외부 전원공급장치 관련 정보

□ 국내 관련제품 정보 및 조치사항

- 지이헬스케어코리아(주)에서 수입품목허가된 4개 모델, 235대 해당
- 해당 제품의 사용된 외부 전원공급장치의 관리번호는 “6050-0006-579”

제조원	수입업체	품목명	허가 번호	형 명
GE Healthcare (제조국: 멕시코)	지이헬스케어 코리아(주)	펄스 옥시미터	수허 06-623호	Pulsioximetro Datex-Ohmeda Modelo Trusa TruSat, ① amarillo 6051-0000-190 ② blanco 6051-0000-192 ③ amarillo 6051-0000-191 ④ blanco 6051-0000-193

- 수입업체에서는 ‘외부 전원공급장치를 충전 시에만 사용’하도록 하는 안전성 정보를 사용 의료기관에 제공(10.4.9)하였으며, 제조원에서 안전한 외부 전원공급장치를 공급받아 교체할 예정 임

□ 사용자 안내 사항

- 해당 제품의 산소농도계 전면 패널에 있는 전원 녹색LED가 켜져 있는지 상시 확인할 것.
- 해당 제품 사용시에는 외부 전원공급장치를 분리하고, 내부 배터리로만 사용할 것
- 외부 전원공급장치는 충전 시에만 사용하고, 외부 전원공급장치의 외장이 파손된 경우, 즉시 사용을 중지할 것.

※ 참고자료

【관련제품 사진】



【외부 전원공급장치】



【수입업체 정보】

○ 지이헬스케어코리아(주) : 02-6201-3329

