

Procedure ▶




Step1. 헤어라인의 끝부분 Puncture. (메스로 살짝 찢어주거나 니들 사용)




Step2. 트로카와 캐놀라를 결합하여 Target 0까지 전천의 진행시킵니다. (이때 Deep fascia 트로카와면용 하이드로유를주어줍니다.)




Step3. 이때 의도한 방향으로 트로카가 진행되도록 손끝으로 지근이 눌러가며 방향을 잡아줍니다.

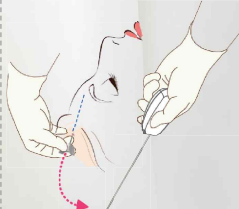

Step4. 캐놀라를 밀쳐두고 트로카를 제거합니다.

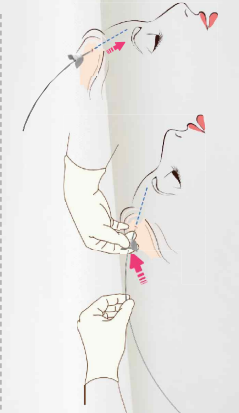


Step5. 3D Mesh의 삼상부(돌기 형성부)를 캐놀라를 통해 진입시킵니다.

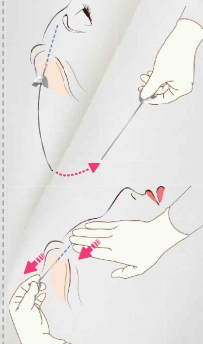

Step6. 3D Mesh가 잘 자리를 잡도록 사출 부위를 손바닥으로 지근이 눌러가는 동시에 캐놀라를 제거합니다.



Step7. Target 0 도 동양와 양방향으로 진행합니다.

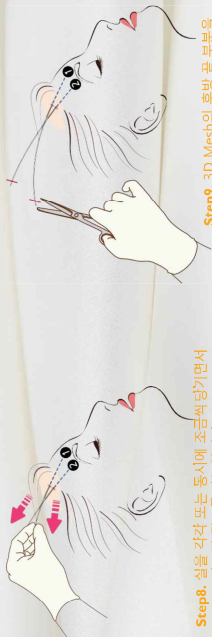


Step8. 실을 각각 또는 동시에 조금씩 당기면서 리프팅 정도를 가능합니다.




Step9. 3D Mesh의 흉부 끝 부분을 약 5mm 정도 거당 합니다.



Step10. 거당 후 3D Mesh 내부의 속심을 조심스럽게 잡아당겨 제거합니다.

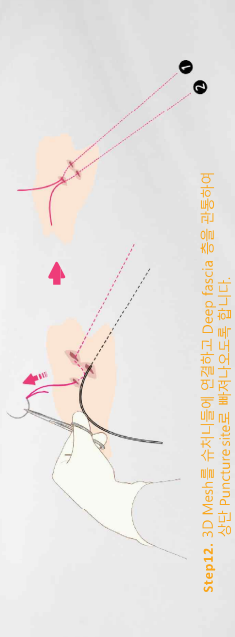

Step11. 각각 0과 0 사이의 약 1cm 상단으로 3D Mesh 고정을 위한 Puncture. (메스로 살짝 찢어 주거나 니들 사용)

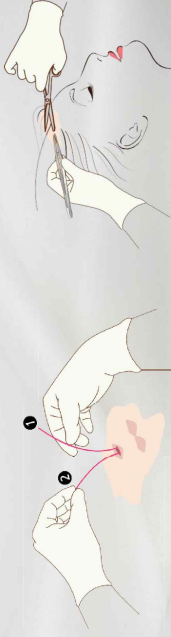

Step12. 3D Mesh를 슈치니들에 연결하고 Deep fascia 층을 관통하여 상단 Puncture site로 빠져나오도록 합니다.

Step13. 0 0 를 잡고 Lifting 정도를 확인하면서 시론 시곳이 약 3~4회 Tie 합니다.

Step14. Puncture site로 통해 나온 실을 살짝 돌려서 활결이 커짐하고 마무리합니다.

나의 가치를 높여줍니다.



레이즈미업
RaiseMeUp[®]_B
3D Mesh Lifting

세계최초의 **3D Mesh Lifting**

3D Mesh와 그 사이로 형성된 볼기는 조직을 강렬하고 안정적으로 잡아당겨 주며, 영구적인 변화 작용으로 자연스럽고 변형구적인 유지를 가능하게 해줍니다.

시술비문의

FORWARD MEDICAL

서울시 용마구 효창동 684번지 가든하이브(이)모 L7137/7138호
Tel. 070-7979-9307 E-MAIL forwardm@naver.com

PM-RMU-B-Cas-06(14)-Rev.02



레이즈미업 RaiseMeUp[®]_B 3D Mesh Lifting

RaiseMeUp[®]_B는 지름 0.07mm의 Polypropylene Monofilament로 직조된 3D Mesh 와 내장되어 있는 Barb로 이루어져 있습니다.



시술은 비접촉적으로 이루어지며 시술한 뒤 즉시 효과를 확인할 수 있습니다.

시술 후 15~30일 뒤에는 부드러운 물성의 3D Mesh의 Pore 사이로 조직이 자리잡아 리프팅이 된 상태를 장기적으로 유지할 수 있습니다.



Barb가 내장 되어 있는 3D Mesh는 강력한 응집력으로 함입에 탁월한 효과를 가져다 줍니다.


조직이 자리잡은 후에는 질이나 끈면 매쉬가 아닌 인체 구조와 매우 가까운 조직을 지지하기 때문에 자연스러운 리프팅이 가능합니다.



시술시간이 양쪽 약 20분으로 매우 짧으며

수면마취를 하지 않고 부분 국소마취만으로 시술이 가능합니다.

3D Mesh Technology

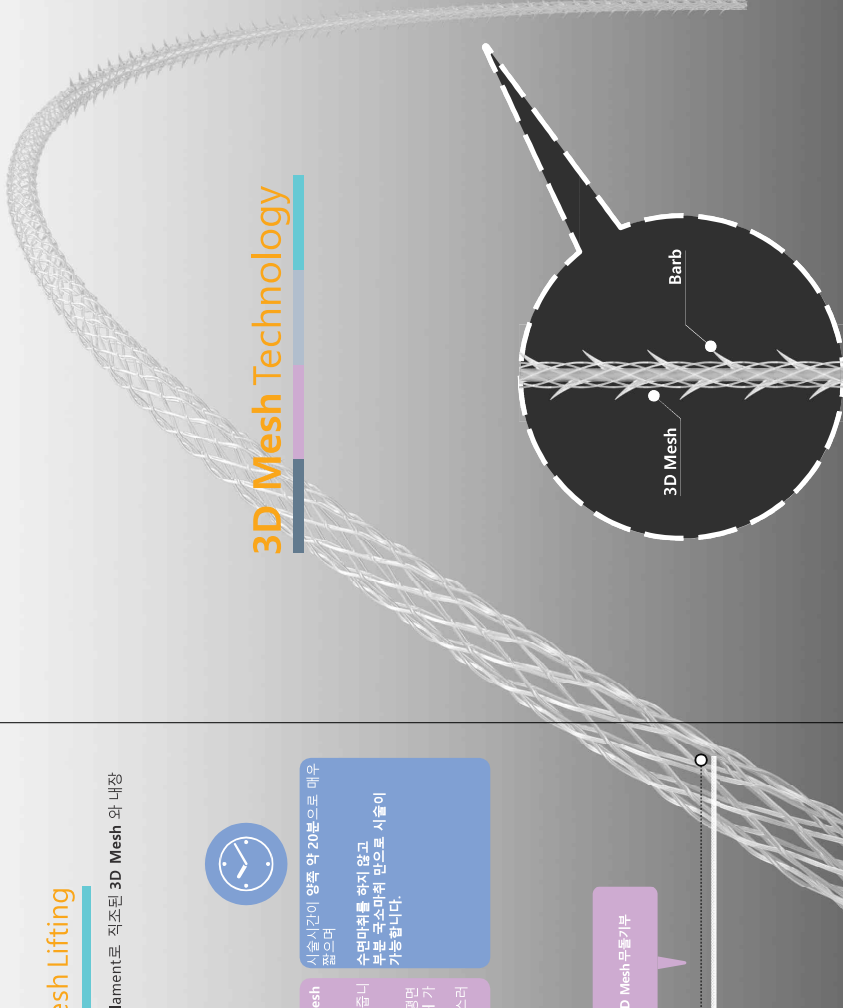

“

RaiseMeUp[®]_B는

피부를 절개하지 않고 별다른 장치 없이 작은 구멍으로 시술 하며 조직을 당기는 동시에 고정하는 이상적인 메커니즘을 가지고 있습니다.

”

레이즈미업
RaiseMeUp[®]_B
3D Mesh Lifting